

1. COMPONENTI

• TELAIO FRONTALE

MATERIALE : DIMENGEL 100
LDPE Plastazote 3 mm

DIMENSIONI : Altezza 25 mm / diametro int. 140 mm / diametro est. 180 mm

COLORE : BIANCO

• SCHERMO PROTETTIVO

MATERIALE : POLIPROPILENE ANTIGRAFFIO APET GLOSS

SPESSORE : 0,20 mm

COLORE : TRASPARENTE CRISTAL

DIMENSIONI : 340 mm x 220 mm

• PRODUZIONE

PROTECH Visiera Protettiva è prodotta da STAGETECH srl viale Spagna 150-B Cologno Monzese attraverso l'innovativo processo di stampa 3D. MADE IN ITALY.

2. PROPERTA'

• ANAGRAFICA

NOME : PROTECH- VISIERA PROTETTIVA.

DESCRIZIONE : VISIERA PROTETTIVA con TELAIO FRONTALE RIUTILIZZABILE e SCHERMO PROTETTIVO MONOUSO INTERCAMBIABILE.

COLORE : BIANCO – TRASPARENTE.

DESTINAZIONE D'USO : PROTEZIONE DELL'OPERATORE DURANTE LA PRATICA MEDICA, DI LABORATORIO, ED INDUSTRIALE.

REF PRODOTTO : FS-3422-SC (TELAIO + 10 SCHERMI)
FS-3422-SP (SOLO TELAIO)
FS-3422-SR (10 SCHERMI)

CODICE TARIC : 39269099

• CARATTERISTICHE

MISURE E PESI	:	codice	Lungh. mm	largh mm	altezza mm	peso kg
-PEZZO SINGOLO		FS-3422-SC	350	230	30	0,25
		FS-3422-SP	350	230	30	0,20
		FS-3422-SR	350	230	5	0,05
-CARTONE (10 pz)		FM-3422-SC	360	240	310	3,0
		FM-3422-SP	360	240	310	2,5
		FM-3422-SR	360	240	50	0,5

DURATA	:	TELAIO RIUTILIZZABILE / SCHERMO MONOUSO				
TEMPERATURA	:	- CONSIGLIATA	min	8°C	MAX	30°C
		- D'USO	min	-10°C	MAX	50°C
		- LIMITE	min	-25°C	MAX	70°C
DURATA	:	3 ANNI DALLA DATA DI PRODUZIONE SE CONSERVATO CORRETTAMENTE.				
CONFEZIONAMENTO	:	SINGOLO TELAIO + 10 SCHERMI MONOUSO (INCLUSI) OPPURE 10 SCHERMI MONOUSO. 10 PEZZI PER CARTONE.				
NORMATIVA	:	DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1, NON STERILE AI SENSI DEL D. L. 24/02/97 N° 46 ART. 1, COMMA 2 A/B, IN ATTUAZIONE DIRETTIVA 93/42 CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI. CND T020699. Nr REPERTORIO D.M. 1943799/R				

3. ISTRUZIONI ED AVVERTENZE


• MODO D'USO

ISTALLAZIONE	:	<ol style="list-style-type: none">1. CONTROLLARE L'INTEGRITA' DELLA BUSTA PRIMARIA.2. RIMUOVERE IL TELAIO FRONTALE DALLA BUSTA.3. FISSARE LO SCHERMO MONOUSO AL TELAIO FRONTALE TRAMITE GLI APPOSITI FORI E GANCI.4. INDOSSARE LA VISIERA ASSEMBLATA CENTRANDOLA SULLA FRONTE.
UTILIZZO	:	<p>UN VOLTA INDOSSATA, LA VISIERA NON PREVIENE IL CONTAGIO DA INFEZIONI O MALATTIE MA RIDUCE PURAMENTE IL RISCHIO DI SPRUZZI DI LIQUIDI ORGANICI NELLA BOCCA, NEL NASO E NEGLI OCCHI DELL'UTILIZZATORE.</p> <p>NON UTILIZZARE A CONTATTO CON OLI PESANTI, FIAMME LIBERE O IN AMBIENTI CON CONDIZIONI DI ECCESSIVO CALORE.</p>
CONSERVAZIONE	:	<ol style="list-style-type: none">1. CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE.2. PROTEGGERE DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE.3. CONSERVARE NELL'IMBALLO ORIGINALE.
SMALTIMENTO	:	IN OSSERVANZA DELLE REGOLE E DISPOSIZIONI IN AMBITO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI.

• PRECAUZIONI

MANUTENZIONE	:	IL TELAIO DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE DISINFETTATO DOPO OGNI UTILIZZO. LO SCHERMO MONOUSO DEVE ESSERE GETTATO DOPO L'USO.
CONTATTO	:	IN CASO DI IPERSENSIBILITA', SCIACQUARE CON ACQUA FRESCA, ASCIUGARE CON UN PANNO ASCIUTTO E PULITO E RIVOLGERSI AD UN MEDICO SPECIALISTA.
INFIAMMABILITA'	:	NON FACILMENTE INFIAMMABILE.

4. IMMAGINI PRODOTTO

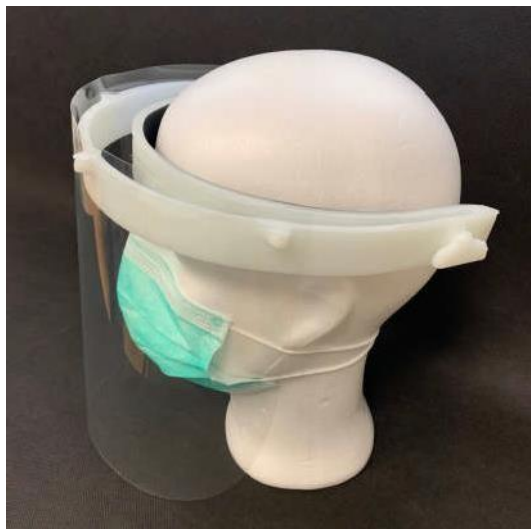

NOTA: Le informazioni contenute qui si riferiscono al solo prodotto in esame e potrebbero non essere confermate se utilizzato in combinazione ad altri prodotti. Le informazioni qui contenute sono accurate ed affidabili rispetto alle nostre conoscenze, ciò non ostante ogni utilizzatore dovrà verificarne l'applicabilità in relazione al particolare utilizzo che del prodotto intende fare.